



 130 - 180 cm
fino a 80 kg

DEKRA test (Rehab -
"S") incl. collaudo di
tutti gli accessori
riabilitativi
in conformità a
R129

HERCULES PRIME

R129

**Il seggiolino auto riabilitativo modulare
che cresce con l'utente per molto tempo**


Thomashilfen

Hercules Prime

» È necessaria una soluzione efficace per i bambini, i ragazzi e gli adulti con disabilità fisiche e neurologiche, affinché siano sempre al sicuro in auto.

Hercules Prime offre ottime prestazioni quando i seggiolini auto riabilitativi sono diventati troppo piccoli o è necessario un maggiore supporto in auto. Essendo un sedile di posizionamento modulare che cresce con l'utente, offre le funzioni familiari di un seggiolino auto riabilitativo e può essere adattato individualmente con un'ampia selezione di accessori che crescono con l'utente. Quando è necessario un maggiore supporto per la testa e la parte superiore del corpo, un semplice sistema di cinture in auto non è sufficiente.

Per una posizione di seduta corretta e sicura in ogni viaggio. «



Sempre raccomandato per tutte le diagnosi che includono un controllo limitato del tronco

Ora con
PROTEZIONE DAGLI URTI LATERALI E NUOVO POGGIATESTA



L'immagine include alcuni accessori

Grande successo in Europa & Nord America


- ▶ fino a 180 cm
- ▶ fino a 80 kg
- ▶ protezione dagli urti laterali
- ▶ estremamente piccolo da piegato
- ▶ regolazione facile e veloce
- ▶ regolazione rapida e continua dell'inclinazione dello schienale
- ▶ testato in modo affidabile da:

DEKRA test (rehab - "S") incl. collaudo di tutti gli accessori riabilitativi in conformità con R129



Thomashilfen fornisce seggiolini auto riabilitativi per bambini con esigenze speciali da oltre 30 anni. Oggi utilizziamo il nostro know-how anche per sviluppare i nostri seggiolini auto riabilitativi per bambini e adulti, che incorporano tutta la nostra pluriennale esperienza nel soddisfare le esigenze degli utenti e dei loro familiari.

Gunnar Thomas
Gunnar Thomas, owner

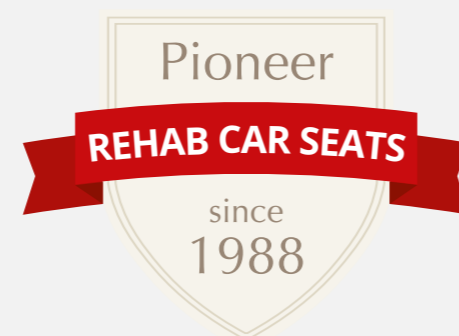

ALTEZZA DELLO SCHIENALE

Grazie alla regolazione continua dell'altezza dello schienale di 25 cm, è possibile adattarlo in qualsiasi momento alla crescita dell'utente. La testa viene sostenuta nella posizione ottimale. L'ampia scelta di accessori garantisce una lunga durata del seggiolino che cresce con l'utente.





La **GUIDA CINTURA** per la cintura di sicurezza a 3 punti del veicolo, utilizzabile sia a destra che a sinistra, consente di posizionare il seggiolino in modo rapido e semplice.



I **SUPPORTI LATERALI PER IL TRONCO** sostengono la parte superiore del corpo e sono regolabili individualmente (accessorio). Disponibili altri accessori che crescono con l'utente per supportare e posizionare la parte superiore del corpo.



L'**IMBOTTITURA INGUINALE** riduce la pressione della fibbia della cintura sulla zona addominale sensibile e nasconde la fibbia della cintura.



FIBBIA DELLA CINTURA
Le cinghie delle spalle possono essere agganciate separatamente alla chiusura a sgancio rapido, il che semplifica l'allacciamento per gli assistenti.



IMBRACATURA A 5 PUNTI
Le morbide spalline offrono un supporto aggiuntivo e una buona posizione di seduta durante il tragitto: la lunghezza corretta della cinghia si regola rapidamente tramite due fibbie.



RIVESTIMENTO
Imbottitura spessa per una seduta confortevole senza fastidiosa sudorazione; la fodera traspirante è completamente sfoderabile e lavabile a 40° C.



PROFONDITÀ DEL SEDILE regolabile in continuo di 8 cm, adattamento individuale alla crescita dell'utente.



POGGIATESTA per un corretto posizionamento della testa e una posizione sicura e affidabile



La **PROTEZIONE ANTI-IMPATTO LATERALE** assorbe l'energia in caso di urti laterali.



ALTEZZA SCHIENALE può essere regolata in continuo, in modo che il sedile si adatti all'utente e consenta un lungo periodo di utilizzo.



L'ANGOLAZIONE DELLO SCHIENALE può essere regolata in base allo schienale in due semplici passaggi: non sono necessari attrezzi, basta utilizzare la leva rossa di sgancio rapido.



CUSCINO DI SEDUTA offre un'ampia superficie di seduta (38 cm) per utenti di corporatura robusta e facilita l'ingresso e l'uscita dal seggiolino. Anche il trasferimento per genitori e tutori è più semplice e non affatica la schiena.

ACCESSORI per un seggiolino personalizzabile, confortevole & che cresce con l'utente

► Basi funzionali



PIANO ROTANTE facilita il trasferimento, il sedile di posizionamento può essere ruotato a sinistra o a destra

Per agevolare il trasferimento di utenti sempre più pesanti con esigenze particolari, la funzione girevole offre un vero sollievo alla schiena degli assistenti. La rotazione può essere modificata da sinistra a destra. Il pulsante di sgancio è montato nella parte anteriore per garantire un facile utilizzo.



La **FUNZIONE DI INCLINAZIONE** consente l'inclinazione del sedile in più fasi per una posizione di riposo rilassata durante la guida.

In caso di scarso controllo della parte superiore del corpo e della testa (ipotonia, "flaccidità"), il sedile con l'inclinazione regolabile è un supporto importante per evitare il "ribaltamento in avanti". L'utente siede in una posizione di riposo rilassata e non deve svolgere alcun lavoro di mantenimento faticoso. L'angolazione appropriata può essere regolata secondo necessità.

► Comfort di seduta regolabile con precisione e supporto ottimale per le esigenze individuali



I **SUPPORTI LATERALI DEL TRONCO** (rigidi) forniscono un solido supporto laterale e sostengono il torace.



I **SUPPORTI LATERALI DEL TRONCO** (ribaltabili) forniscono un solido supporto laterale per il torace e facilitano il trasferimento.



La **GUIDA PER LA PARTE SUPERIORE DEL CORPO** (rigida) fornisce un supporto laterale stabile su un'ampia area e sostiene la parte superiore del corpo.



La **GUIDA PER LA PARTE SUPERIORE DEL CORPO** (swing-away) fornisce un supporto laterale stabile su un'ampia area della parte superiore del corpo e facilita il trasferimento.

► Stabilità per il seggiolino auto riabilitativo



KIT ISOFIX (dietro il sedile) mantiene il sedile saldamente in posizione durante il viaggio, anche senza un utente



La **BARRA STABILIZZATRICE** assicura che il seggiolino sia tenuto saldamente in posizione quando non è disponibile alcun Isofix



Il **SUPPORTO ANTERIORE** garantisce una tenuta stabile del sedile nella zona dei piedi

Soprattutto quando si utilizza la funzione girevole e basculante, il sedile di posizionamento è esposto a sollecitazioni aggiuntive nell'uso quotidiano. È consigliabile utilizzare accessori utili per stabilizzare il sedile di posizionamento in auto, per una migliore maneggevolezza e una maggiore sicurezza per utenti e assistenti.



Il **BLOCCO DELL'ABDUZIONE** migliora la guida delle gambe e impedisce che le gambe si incrocino.



Le **GUIDE GAMBE** (sinistra e destra) supportano una posizione seduta stabile e forniscono anche il sostegno necessario per le cosce.



La **COVER IMPERMEABILE** si posiziona sul cuscino del sedile. Protegge il seggiolino dall'umidità, così rimane pulito più a lungo.

► Supporto sicuro per testa e piedi



POGGIATESTA per un corretto posizionamento della testa e una tenuta sicura e affidabile



SECONDA GUIDA CINTURA (superiore) come comoda opzione per utilizzare la cintura di sicurezza a 3 punti sia sul lato destro che su quello sinistro



POGGIAPIEDI (pieghevole) aiuta a salire e scendere dal sedile e impedisce di scivolare fuori dal sedile (*altezza e angolazione regolabili*)

► Utente & veicolo protetti in modo sicuro



La **COPERTURA ANTERIORE** protegge le gambe ed evita sfregamenti sulla piastra di profondità del sedile



CLIP TORACICA Evita pericolose torsioni delle cinghie e ne assicura la tenuta in posizione



CUSCINO PER BASE FUNZIONALE garantisce la massima superficie di contatto tra il sedile del veicolo e la base funzionale per un trasferimento più facile



Il **TAPPETO DI PROTEZIONE** per il sedile dell'auto, protegge il sedile del veicolo e offre 3 pratiche tasche per piccoli oggetti nella parte anteriore.



NELL'USO QUOTIDIANO

Regolare il seggiolino ortopedico quando lo si posiziona nel veicolo.

All'altezza massima dello schienale, la distanza tra la parte superiore della testa e il tetto del veicolo deve essere di almeno 5 cm, per garantire che gli utenti alti possano comunque sedersi comodamente.

DA GRANDE A PICCOLO E PRATICO

Il grande seggiolino ortopedico può essere ripiegato rapidamente in poche semplici mosse fino a raggiungere dimensioni ridotte e pratiche.

Questo non solo facilita l'installazione nel veicolo, ma può anche essere trasportato facilmente nelle auto di piccole dimensioni e riposto per risparmiare spazio.



SOLO 55 x 21 x 60 cm

Dimensioni & pesi	Hercules Prime
Profondità seduta	40 - 48 cm
Larghezza seduta	38 cm
Altezza schienale (seduta interna)	55 - 80 cm
Larghezza schienale (seduta)	45 cm
Altezza spalle (guida cintura)	38 - 60 cm
Larghezza spalle (con guida per spalle)	45 cm
Reclinazione schienale (max.)	135°
Basculamento (modello base)	0°
(con piano reclinazione 10°)	0° / 2,5° / 5° / 7,5° / 10°
(con piano reclinazione 20°)	10° / 12,5° / 15° / 17,5° / 20°
Lunghezza da cavo popliteo (con poggiatesta)	17 - 43 cm
Altezza supporti laterali tronco	20 - 45 cm
Distanza max supporti laterali tronco	41 cm
Ingombro totale max (L x H x P)	52 x 88 x 43 cm
Ingombro da piegato (L x H x P)	55 x 21 x 60 cm
Peso (configurazione base)	12,3 kg
Altezza max utente	130 - 180 cm
Portata max	80 kg

Caratteristiche standard:

Protezione dagli impatti laterali; schienale con regolazione dell'altezza integrata; seduta con regolazione della profondità integrata; regolazione continua dell'inclinazione dello schienale con leva di sgancio rapido; imbottitura traspirante con tessuto di rivestimento ignifugo; cuscino per la testa; cuscino per lo schienale; cuscino pelvico; cuscino per la seduta; imbottitura per le gambe; cintura a 5 punti con spallacci; guida per cintura a 3 punti del veicolo (utilizzabile a destra o a sinistra); predisposizione per il montaggio di tutti gli accessori; rivestimenti sfoderabili; lavabile in lavatrice fino a 40° C.



Watch the video:
How Hercules Prime is installed quickly and easily in your car

